

LABSTGO²⁰²⁴

OFICINA DE DISCAPACIDAD

Subdirección de Igualdad de género, Diversidad Sexual e Inclusión.



PORTAFOLIO



ABRIDOR DE BOTELLAS

Elemento fabricado en polímero PLA que facilita la apertura de botellas plásticas, con tapa de 3 cm de diámetro

Modo de uso: Tomar el abridor por el mango. La parte circular y estriada del abridor debe encajar con la tapa de la botella. Luego rotar y desenroscar.

Dirigido principalmente a:
Personas con discapacidad física las cuales pueden ser causadas por enfermedades reumáticas como Artritis, Artrosis y Fibromialgia, u otros diagnósticos como el Síndrome de dolor regional complejo que tengan por consecuencia la disminución en la movilidad de miembros superiores.



Dimensiones: 140 x 65 x 15 mm aprox.
Colores: disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 1 abridor
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.
No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

Oficina de Discapacidad LAB Stgo / Tecnologías de Apoyo	Vivamos bien STGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD
	
Abridor de botellas Facilitador de apertura de botellas	
Beneficios <ul style="list-style-type: none">• Reduce el esfuerzo y facilita la maniobra de apertura.• Permite una sujeción firme, que mejora la precisión en la actividad.	
Cuidados <ul style="list-style-type: none">• Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.• No exponer a altas temperaturas ni a elementos corrosivos.	

IDENTIFICADOR DE LLAVES

Fundas de termoplástico flexible, TPU, que permite la identificación de las llaves a través del tacto, gracias a las diferentes figuras que lo componen.

Modo de uso: Estas fundas se colocan en la parte superior de cada llave, haciendo coincidir los orificios. Finalmente colocar la llave en la argolla metálica.

Nota: es necesario un poco de fuerza para que las fundas queden bien colocadas.

Dirigido principalmente a: Personas con discapacidad visual; personas ciegas o de baja visión.



Oficina de Discapacidad
LabSTGO
Apoyos Técnicos

Vivamos bien
STGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD



Identificador de llaves

Set de fundas de diferentes diseños que permite la identificación de llaves

Modo de uso: se debe cubrir la parte superior de la llave hasta que ambos orificios calcen. Luego colocar la llave en el aro del llavero.

Dimensiones: 33 x 20 x 4 mm aprox.
Colores: disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 4 fundas
- Argolla plástica para su entrega
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto. No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

3

IDENTIFICADOR DE BILLETES

Apoyo técnico fabricado en polímero PLA que permite el reconocimiento de billetes nacionales a través del tacto.

Modo de uso: La pieza cuenta con dos solapas, una más larga que la otra. Entre ellas debe introducir el billete. Luego sostener el billete con un dedo hasta que toque con la parte final de la solapa más corta. Posterior a eso doblar el billete hasta que coincida con una de las líneas de la solapa más larga.

Dirigido principalmente a:
Personas con discapacidad;
personas ciegas o de baja
visión.



Dimensiones: 80 x 70 x 6 mm aprox.
Colores: disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 1 identificador de billetes
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.
No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

Oficina de Discapacidad
LabSTGO
Apoyos Técnicos

Vivamos bien
STGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Identificador de billetes

Apoyo técnico que facilita el reconocimiento de billetes chilenos (\$1.000, \$2.000, \$5.000, \$10.000 y \$20.000) a través del tacto.

Modo de uso:

1.- Introducir el billete entre las dos cara hasta topar con el fondo de la pieza. Sostener con un dedo para que el billete no se mueva.

2.- Girar la pieza y doblar el billete hasta hacerlo coincidir con una de las líneas y así identificar su valor.

DOMINÓ

4

Juego de mesa fabricado en polímero PLA, diseñado con relieves que permite la identificación de las fichas a través del tacto. Es un elemento de acceso universal.

Modo de uso: las mismas reglas del juego tradicional.



Dirigido principalmente a: Personas con discapacidad visual; personas ciegas o de baja visión.

Oficina de Discapacidad
LabSTGO
Apoyos Técnicos

Vivamos bien
STGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Dominó

Juego de mesa diseñado con relieves que permite identificar las fichas a través del tacto. Puede ser utilizado por personas con y sin discapacidad visual.



La caja contiene:
28 piezas de plástico en dos colores para generar contraste con puntos en relieve para su lectura a través del tacto.

IMPORTANTE
La combinación de colores puede variar - No exponer a altas temperaturas ni al fuego - Se puede lavar con agua y jabón o lavalozas

Dimensiones: 40 x 20 x 10 mm
Colores: contrastantes y disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 28 fichas de dos colores.
- Folleto informativo
- Caja con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.
No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

5 GRIPS PARA LÁPICES/PINCELES

Adaptador de lápices y pinceles, fabricado en polímero PLA con 3 tamaños diferentes, que favorece la posición apropiada de los dedos durante tareas de escritura y dibujo.

Modo de uso:

Se introduce un lápiz de madera (grafito o de color), se debe realizar agarre palmar completo para iniciar el posicionamiento de la mano para la iniciación del escritura o pintura

Dirigido principalmente a: personas que comienzan con la escritura y trazos simples, o bien personas con discapacidad física, las cuales pueden ser causadas por enfermedades reumáticas como Artritis, Artrosis y Fibromialgia, u otros diagnósticos como el Síndrome de dolor regional complejo que tengan por consecuencia la disminución en la movilidad de miembros superiores.



Dimensiones (diámetro): 40mm, 50 mm y 55 mm.

Colores: Disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- Grips (dependiendo de la cantidad requerida)
- Folleto informativo
- Caja con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.

No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

CUBO BRAILLE

6

Elemento fabricado en polímero PLA que permite la práctica de las letras en sistema Braille.

Modo de uso: El elemento consta de 3 bloques que rotan en un eje central, que permiten posicionar cada uno según la letra que se desea representar. El elemento funciona como estudio y aprendizaje del alfabeto en braille.

Dirigido principalmente a: Personas con discapacidad visual; personas ciegas o de baja visión. Personas que desean aprender el alfabeto en braille



Oficina de Discapacidad
LabSTGO
Apoyos Técnicos

Vivamos bien
STGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Cubo con 3 eslabones que permiten realizar las 63 combinaciones para el aprendizaje del sistema Braille



Cubo aprendizaje Braille

Contenido:
Un cubo de 4 x 2,5 x 2,5 cm

IMPORTANTE

La combinación de colores puede variar - No exponer a altas temperaturas ni al fuego - Se puede lavar con agua y jabón o lavalozas

Dimensiones: 30 x 30 x 44 mm
Colores: Disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 1 cubo rotativo
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto. No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

7 FICHAS BRAILLE

Elemento fabricado en polímero PLA que permite la identificación y aprendizaje del sistema Braille.



Modo de uso: Se posicionan las fichas en una superficie plana, que permita la identificación táctil de las mismas a través del pulpejo o yemas del dedo, con la finalidad de identificar la letra con decodificación.

Dirigido principalmente a: Personas con discapacidad; personas ciegas o de baja visión y personas que estudian Braille.

Dimensiones fichas letras: 35 x 20 x 4 mm
Dimensiones fichas números: 35 x 35 x 4 mm
Colores: contrastantes y disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN LETRAS

- 27 fichas con las letras del abecedario y 6 grupos adicionales de vocales.
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

PRESENTACIÓN NÚMEROS

- 10 fichas de números del 0 al 9.
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Oficina de Discapacidad
LabSTGO
Apoyos Técnicos

Vivamos bien
STGO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Fichas con el abecedario para el aprendizaje del sistema Braille



Fichas aprendizaje Braille

Contenido:
27 letras del abecedario más 6 grupos de vocales

IMPORTANTE

La combinación de colores puede variar - No exponer a altas temperaturas ni al fuego - Se puede lavar con agua y jabón o lavalozas

SOPORTE CELULAR

Elemento fabricado en polímero PLA que permite la sujeción vertical u horizontal de teléfonos celulares.



Modo de uso: seguir indicaciones de folleto incluido.

Dimensiones formato plano: 90 x 50 x 2 mm
Dimensiones armado: 75 x 25 x 65 mm aprox.
Colores: Disponibles según stock de filamentos.

Dirigido principalmente a: todas las personas que requieran posicionar el teléfono de manera fija y estable, personas con discapacidad física, las cuales pueden tener origen por enfermedades reumáticas como Artritis, Artrosis y Fibromialgia, u otros diagnósticos como el Síndrome de dolor regional complejo que tengan por consecuencia la disminución en la movilidad de miembros superiores.

PRESENTACIÓN


- 1 soporte formato plano
- Folleto de modo de armado
- Sobre con logo Municipal y código QR en su parte posterior para video explicativo.

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto. No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

9 Llavero logo accesibilidad universal

Elemento fabricado en polímero PLA que representa la accesibilidad universal a través de su logo.

Dirigido principalmente a: todas las personas que quieran visibilizar la accesibilidad universal.

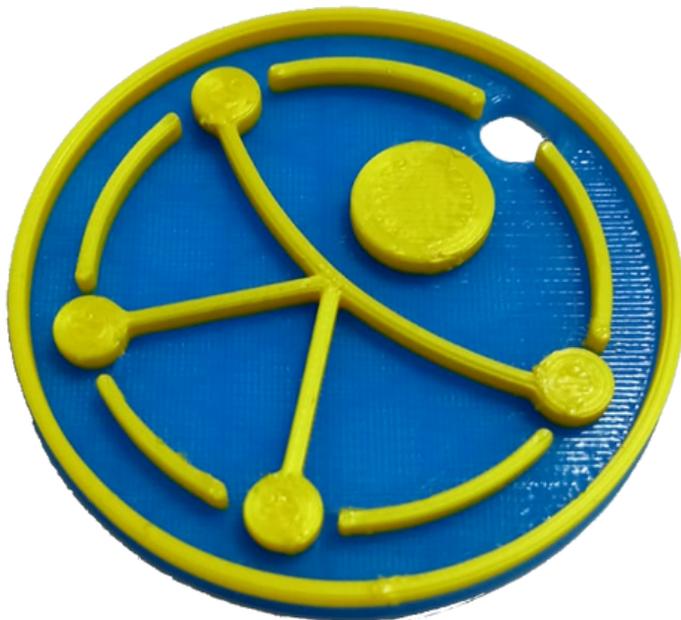

Dimensiones: 40 mm de diámetro x 4 mm
Colores: contrastantes y disponibles según stock de filamentos.

PRESENTACIÓN

- 1 llavero con argolla plástica
- Folleto informativo
- Sobre con logo Municipal

Cuidados: Utilice un paño húmedo o seco para limpiar el producto.
No exponer a altas temperaturas ni elementos corrosivos.

Cómo solicitar las ayudas técnicas

Enviar un correo a of.discapacidad@munistgo.cl para coordinar la solicitud y entrega.



LABSTGO²⁰²⁴

OFICINA DE DISCAPACIDAD
Subdirección de Igualdad de género, Diversidad Sexual e Inclusión.